

<p>التشغيل</p> <p>التشغيل: عند الاستعداد للنوم، اربط الجهاز بإحكام حول رسغ اليد أو مفصل القدم، ثم اضغط الزر مرة واحدة (زر ال تشغيل هو أيضا للتوقيف)، سيتم سماع صوت الصافرة ثلاث مرات متتالية لتأكيد التشغيل. يمكن التأكد من وضع التشغيل بالضغط على الزر مرة وسماع صوت الصافرة مرتين.</p> <p>عند سماع المنبه: ستظهر على الشاشة ساسلة من 4 صافرات متتالية مع اهتزاز الجهاز عند التقاطه لانخفاض في درجة حرار الجلد، وسيستمر التنبيه حتى اطفاء الجهاز.</p>	<p>التوقيف خلال الإنذار: الضغط على الزر مرتين في غضون ثانية سيضطر الى اصدار صافرة واحدة طويلة قبل الاغلاق. في هذا الوقت ، ينبغي اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحديد ما اذا كانت أعراض هبوط السكر في الدم حاضره. على سبيل المثال ، اختبار الدم.</p> <p>إيقاف تشغيل بدون إنذار: عند عدم ارتداء الجهاز، فإنه ينبغي اطفاءه للمحافظة على البطارية. نعمل ذلك من خلال ضغط الزر لعشر ثوان لتفعيل الإنذار. عند سماع الصافرة ، اضغط على الزر مرتين في حدود الثانية لإيقاف تشغيل.</p>	<p>تحديد سبب الإنذار</p> <p>عند الاستيقاظ على صوت المنبه ، اطفأ الجهاز وهو لا يزال على المعصم. انتظر 10 ثوان وأعد التشغيل مرة أخرى. اذا سمعت المنبه مرة اخرى في غضون 60 ثانية ، فالعرق هو السبب ، لانه لا يزال موجود على سطح الجلد. اذا لم يتم سماع الإنذار في غضون الـ60 ثانية ، فانه من المرجح ان السبب هو انخفاض في درجة حرارة الجلد.</p>
<p>سجل أجهزة إنذار</p> <p>قد يكون من المفيد ان تقدم للطبيب الخاص بك سجل بالأمور التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تاريخ ووقت التنبيه. • معدل السكر في الدم وقت النوم. • نسبة السكر في الدم في وقت الإنذار. • مالذي شعرت به (برودة ، تعرق ، التشنج ، وغيرها) <p>الرمز الرجعي</p> <p>ⓘ التشغيل/الإيقاف</p> <p>⚠ انتباه، راجع الوثائق.</p> <p>♣ النوع BF يطابق الجزء</p>	<p>اختبار التنبيه</p> <p>لاختبار التنبيه، قم بتشغيل الجهاز ثم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - ضع اصبع رطب على قطعتي المعدن واضغط لـ5-10 ثوان ؛ 2 - الصافرة دليل لتفعيل التشغيل السليم ؛ 3 - اطفأ الجهاز بسرعة الضغط على الزر مرتين ؛ 4 - اذا لم يعمل ، استبدل البطاريه واعد الاختبار ؛ 5 - واذا فشل هذا ، اعد الجهاز الى الصيانة. 	<p>استبدال البطارية</p> <p>*بطارية الجهاز من المفروض ان تستمر على الاقل 6 اشهر في اطار الاستعمال العادي. لاستبدالها ، ببساطة افتح درج البطاريه واستبدل البطارية.</p> <p>* تخلص من البطاريات بسرعة وبشكل سليم.</p> <p>استبدال الصمام</p> <p>عندما تصبح أجهزة استشعار ملطخه، يمكن ان تستبدل باستخدام الاداه التي تأتي مع اجهزة الاستشعار الجديدة المتوفرة في أماكن بيع الجهاز.</p>
<p>الضمان</p> <p>يتم اختبار الجهاز على نطاق واسع قبل ان يتم شحنه ليكون خاليا من العيوب المصنعية لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء.</p> <p>المصنع يتكفل باصلاح او استبدال أي عيب. ويتم تسجيل الرقم المسلسل ، وتاريخ الشراء قبل الشحن.</p>	<p>تحذير</p> <p>القطعتين المعدنيتين في الجهاز الاستشعاريتين يجب أن تكونا على تماس مع الجلد قبل التشغيل من أجل ارساء اساس مرجعي لدرجة حرارة الجلد. أجهزة الاستشعار يجب ان تبقى على اتصال مع الجلد من أجل الكشف عن أي انخفاض في درجة حرارة الجلد.</p> <p>الجهاز لن يكون فعال للأشخاص الذين لا تظهر أعراض العرق او انخفاض في درجة حرارة الجلد عليهم.</p> <p>لا تضع الجهاز في الماء او في حمام البخار.</p>	<p>لا تستبدل اي وسيلة اخرى وفرها لك الطبيب الخاص بك لتحديد بداية الـ hypoglycemia بهذا الجهاز.</p> <p>السلامة</p> <p>ضعف البطاريه: البطاريه المنخفضة يتم تحديدها اوتوماتيكيا ويتم الاشارة لضرورة استبدالها.</p> <p>التشغيل الغير مقصود: الضغط مرارا على الزر بالصدفة لن يتدخل في سير العمل العادي.</p> <p>التنظيف: يمكن تنظيف الجهاز مع قماش رطب.</p>