

操作

开机：晚间睡前将监测器戴在手腕或脚腕上，按 1 次中间的按钮（开关为同一按钮）发出 3 次急促的“哔哔声”，表示监测器已开启。检查监测器状态，按一次中间按钮，会发出两次快速的“哔哔声”。

响闹：当监测器感应到排汗或皮肤温度下降时，监测器会发出连续 4 次的“哔哔声”及震动，“哔哔声”将持续响闹直至监测器被关掉为止。

在响闹状态下关机：在 1 秒钟内按按钮 2 次，监测器发出一声较长的“哔哔声”后便关机。关机后，应进行血糖试验确实是否呈现低血糖症状。

在非响闹状态下关机：在沒有戴上监测器时，应关机以节约电池。关掉方法，按开关按钮 10 秒钟，听到启动的响闹声后再於 1 秒钟内按按钮 2 次，监测器便关掉。

重新装置：如监测器不能正常操作，先撬开电池，再按按钮 10 秒以便重新装置监测器，之后，再插入电池。

检测响闹的原因

被响闹叫醒后，先关掉还佩戴在手上的监测器，等 10 秒钟后，再重新开启监测器。此时，如响闹在 60 秒钟内再次响起，这就是由於排汗所引致，因为监测器还戴在手上；但如在 60 秒钟内沒有再次响闹，这可能是由於皮肤温度下降。

响闹记录

使用者可记录以下信息，以便日后提供给医生。




- 响闹日期及时间
- 晚间睡时的血糖情况
- 响闹时的血糖情况
- 响闹时，使用者的症状(感寒、出汗等)。

响闹测试

先开启监测器：

1. 把湿手指放在金属感应器上约 5-10 秒钟
2. 发出响闹，显示操作正常
3. 迅速按按钮两次，关掉响闹
4. 如果没有响起响闹，更换电池，再次测试
5. 如未能通过测试，产品可于购买后 7 日内退回零售商

参考符号

-  开/关
-  注意，查阅相关资料
-  BF 型加电部件

更换电池*

在正常情况下，电池可使用最少 6 个月。更换电池，撬开电池更换板掉去旧电池，再按按钮 10 秒以便重新装置，再将新电池之正极朝下方放置，及如上述进行测试。

*请妥善处理弃置电池。

保养条款

产品经过严格的测试，由购买日期开始计算，产品享有 1 年(只限於由制造商导致的问题)的维修保养；不包括如:因错误使用而导致监测器损毁；监测器在正常情况使用下出现的磨损或磨花现象；更换电池、改长或改短表带；更换配件等。

Giant Biosensor Limited 是唯一有权决定是否进行修理或更换任何有关有问题的监测器。

请在送回产品修理前，记录产品序号及购买日期。

警告事项

开启监测器之前，必需确保监测器的两个金属感应器与人体皮肤接触，以便记录初始时皮肤体温作参考用。而感应器必须持续接触到皮肤，以便检测皮肤温度变化。

产品不会对没有出现皮肤温度下降或排汗症状的患者作出效用及反应。

产品不能浸入水中或放在充满蒸汽的浴室內。

适量的误报是正常的，若能保持表带舒适带上，有助减少误报至最低限度；此外，监测器穿在足踝，有助保持及固定毛毯下的温度。

安全

电量低：监测器会自动检测到低电量，及发出“唧唧声”。此时，应更换电池。

意外开启监测器：意外地反复触动开关，不会影响产品的正常操作。

清洁：产品可使用普通的湿布清洁。

热线电话：(美国) +1 (701) 347-8016
(香港): +852 3580-8573
(巴林): +973 1729 5625

Giant Biosensor Limited
香港皇后大道中 251 号 太兴中心 2 期 2 楼及 5 楼
www.giantbiosensor.com • info@giantbiosensor.com