

操作

開機：晚間睡前將監測器戴在手腕或腳腕上，按 1 次中間的按鈕（開關為同一按鈕）發出 3 次急促的“嗶嗶聲”，表示監測器已開啓。檢查監測器狀態，按一次中間按鈕，會發出兩次快速的“嗶嗶聲”。

響鬧：當監測器感應到排汗或皮膚溫度下降時，監測器會發出連續 4 次的“嗶嗶聲”及震動，“嗶嗶聲”將持續響鬧直至監測器被關掉為止。

在響鬧狀態下關機：在 1 秒鐘內按按鈕 2 次，監測器發出一聲較長的“嗶嗶聲”後便關機。關機後，應進行血糖試驗確實是否呈現低血糖症狀。

在非響鬧狀態下關機：在沒有戴上監測器時，應關機以節約電池。關掉方法，按開關按鈕 10 秒鐘，聽到啓動的響鬧聲後再於 1 秒鐘內按按鈕 2 次，監測器便關掉。

重新裝置：如監測器不能正常操作，先撬開電池，再按按鈕 10 秒以便重新裝置監測器，之後，再插入電池。

檢測響鬧的原因

被響鬧叫醒後，先關掉還佩戴在手上的監測器，等 10 秒鐘後，再重新開啟監測器。此時，如響鬧在 60 秒鐘內再次響起，這就是由於排汗所引致，因為監測器還戴在手上；但如在 60 秒鐘內沒有再次響鬧，這可能是由於皮膚溫度下降。

響鬧記錄

使用者可記錄以下信息，以便日後提供給醫生。

- 響鬧日期及時間
- 晚間睡時的血糖情況
- 響鬧時的血糖情況
- 響鬧時，使用者的症狀(凍、出汗等)。

響鬧測試

先開啟監測器：

1. 把濕手指放在金屬感應器上約 5-10 秒鐘
2. 發出響鬧，顯示操作正常
3. 迅速按按鈕兩次，關掉響鬧
4. 如果沒有響起響鬧，更換電池，再次測試
5. 如未能通過測試，產品可於購買後 7 日內退回零售商

參考符號



開/關



注意，查閱相關資料



BF 型加電部件

更換電池*

在正常情況下，電池可使用最少 6 個月。更換電池，撬開電池更換板去掉舊電池，再按按鈕 10 秒以便重新裝置，再將新電池之正極朝下方放置，及如上述進行測試。

*請妥善處理棄置電池。

保養條款

產品經過嚴格的測試，由購買日期開始計算，產品享有 1 年(只限於由製造商導致的問題)的維修保養；不包括如：因錯誤使用而導致監測器損毀；監測器在正常情況使用下出現的磨損或磨花現象；更換電池、改長或改短錶帶；更換配件等。

Giant Biosensor Limited 是唯一有權決定是否進行修理或更換任何有關有問題的監測器。

請在送回產品修理前，記錄產品序號及購買日期。

警告事項

開啟監測器之前，必需確保監測器的兩個金屬感應器與人體皮膚接觸，以便記錄初始時皮膚體溫作參考用。而感應器必須持續接觸到皮膚，以便檢測皮膚溫度變化。

產品不會對沒有出現皮膚溫度下降或排汗症狀的患者作出效用及反應。

產品不能浸入水中或放在充滿蒸汽的浴室內。

適量的誤報是正常的，若能保持錶帶舒適帶上，有助減少誤報至最低限度；此外，監測器穿在足踝，有助保持及固定毛毯下的溫度。

安全

電量低：監測器會自動檢測到低電量，及發出“唧唧聲”。此時，應更換電池。

意外開啟監測器：意外地反復觸動開關，不會影響產品的正常操作。

清潔：產品可使用普通的濕布清潔。